

MASQUE BARRIÈRE RÉUTILISABLE UNS1

CE PRODUIT N'EST PAS UN DISPOSITIF MÉDICAL



Masque barrière réutilisable conforme aux recommandations de l'AFNOR SPEC S76-001. Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). Ce masque aux qualités respirantes et filtrantes permet de compléter les gestes barrières et les règles de distanciation sociale visant à lutter contre les infections virales. Lavable et à usage non-sanitaire, **il ne se substitue pas** aux masques normalisés à usage sanitaire ainsi qu'aux gestes barrières.

Ce masque a été testé par la Direction Générale de l'Armement DGA – masque catégorie 1 UNS1.



Couture ajustée pour un confort optimal.


2 plis avec excellente respirabilité.


Attaches ajustables pour toutes tailles.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

 Taille unique, **ajustable** sans élastiques.

 Masque lavable minimum 20 fois sans assouplissant.

 Composition 100% Polyester/PU certifiée OEKO-TEX® STANDARD 100 afin de respecter les peaux les plus fragiles. Très léger.

 Efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m} > 90\%$. Perméabilité à l'air $> 96 \text{ L.m}^2.\text{S}^{-1}$ pour une dépression de 100 Pa.

CONSEILS D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION



Lavage des mains au savon ou gel hydroalcoolique avant chaque manipulation du masque.



Laver à 60°C avec un produit lessiviel après chaque utilisation. Avant le 1er usage, effectuer un lavage.



Séchage mécanique et repassage à une température de 120-130°C.




Les masques non utilisés sont à stocker au sec et à l'abri de la lumière.

NOTICE

Images issues de l'AFNOR SPEC S76-001

METTRE UN MASQUE BARRIÈRE

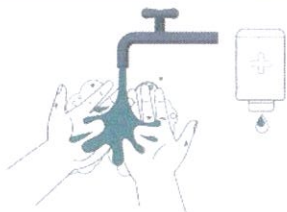

1 Se laver les mains à l'eau et du savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque.



2 Enlever le masque de son emballage et effectuer le lavage selon les recommandations. Procéder au lavage avant chaque utilisation.



3 Repérer le sens du masque et le placer sur le visage.



4 Positionner le masque en l'attachant derrière la tête.



5 Abaisser le bas du masque barrière sous le menton.



6 Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le masque barrière est touché, l'utilisateur doit se laver les mains au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique. Il convient de ne pas le mettre en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après utilisation.

RETIRER UN MASQUE BARRIÈRE



7 Retirer le masque en saisissant par l'arrière sans toucher la partie avant du masque, et placer le dans un contenant spécifique.

LAVER/ JETER UN MASQUE BARRIÈRE



8 Lavage/ séchage selon préconisations. À sa fin de vie, il doit être jeté munie d'un sac plastique.